

test.zmdx.at

SARS-CoV-2 PCR TEST

MIT MUND- RACHENSPÜLLÖSUNG
ZUR EIGENANWENDUNG

ANLEITUNG

 ZENTRUM FÜR
MOLEKULARE
DIAGNOSTIK



Ablauf der Testungen



test.zmdx.at



1



ONLINE REGISTRIEREN

Registrierung auf test.zmdx.at.
Persönliche Daten vervollständigen.



2



PCR TEST GRATIS ABHOLEN

„PCR-Gurgeltest abholen“ in der
WebApp abrufen und bestätigen.
Abholbestätigung in einer
teilnehmenden Filiale/Apotheke
an der Kassa vorweisen.



PCR Test mit nach
Hause nehmen.

3



GURGELN NACH ANLEITUNG

Test unter Videoaufzeichnung
durchführen.

4



PROBE VERPACKEN

Nach erfolgter Testung
die Probenentnahme samt Zellstoff
in den Schutzbeutel geben.
Gebrauchsanleitung aufbewahren.



5



PROBE ABGEBEN

Schutzbeutel samt Probe
in die Abwurfbox der teilnehmenden
Filiale/Apotheke werfen. Laboraus-
wertung erfolgt innerhalb von 24h ab
Probenabholung (siehe Abwurfbox).



6



ERGEBNIS ABRUFEN

Ergebnis per SMS erhalten.
Das offizielle Covid-19-Zertifikat*
kann über den Link in der
SMS abgerufen werden.
*Nur bei gültiger Identifikation

SARS-CoV-2 PCR TEST

MIT MUND- RACHENSPÜLLÖSUNG
ZUR EIGENANWENDUNG

PCR Test Kit


- 1 Kochsalzlösung
- 2 Transferröhrchen
- 3 Probenröhrchen
- 4 Schutzbeutel
- 5 Zellstoff
- 6 PCR Test Verpackung
- 7 Gebrauchsanweisung



WebApp Portal



Registrierungsportal:
QR-Code scannen oder
zum Link: test.zmdx.at

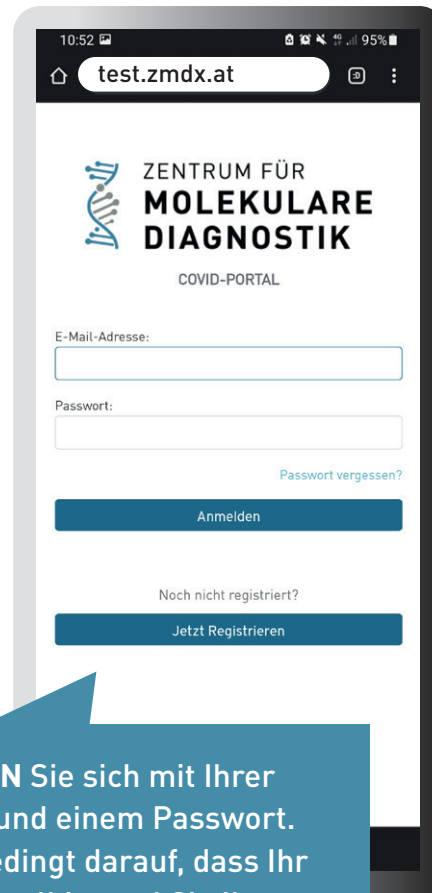

10:52 test.zmdx.at 95%

ZENTRUM FÜR
**MOLEKULARE
DIAGNOSTIK**
COVID-PORTAL

E-Mail-Adresse:


Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

Noch nicht registriert?
Jetzt Registrieren

REGISTRIEREN Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse und einem Passwort. Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Postfach nicht voll ist und Sie Ihre E-Mailadresse richtig schreiben.

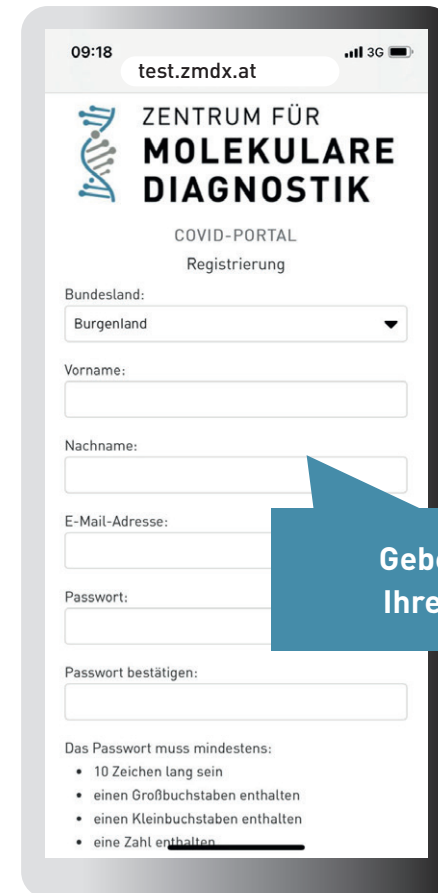

09:18 test.zmdx.at 3G

ZENTRUM FÜR
**MOLEKULARE
DIAGNOSTIK**
COVID-PORTAL
Registrierung

Bundesland:
Burgenland

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:



Passwort:

Passwort bestätigen:


Das Passwort muss mindestens:

- 10 Zeichen lang sein
- einen Großbuchstaben enthalten
- einen Kleinbuchstaben enthalten
- eine Zahl enthalten



Geben Sie hier Ihre Daten an.

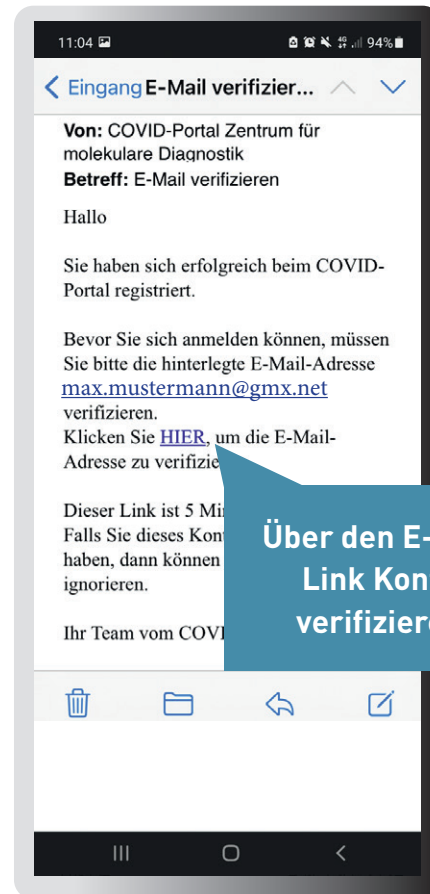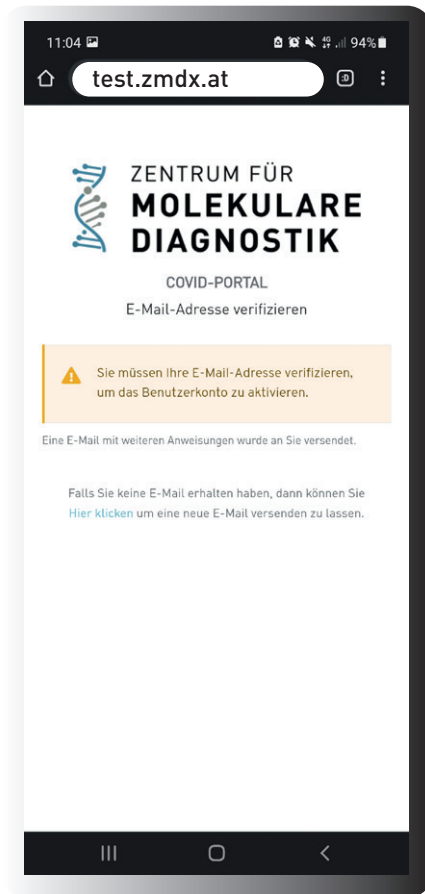


Über den E-Mail Link Konto verifizieren

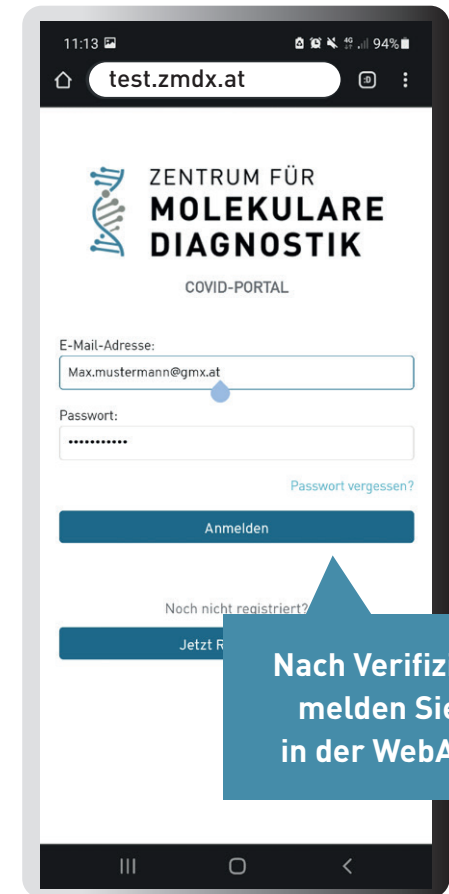

Nach Verifizierung, melden Sie sich in der WebApp an.

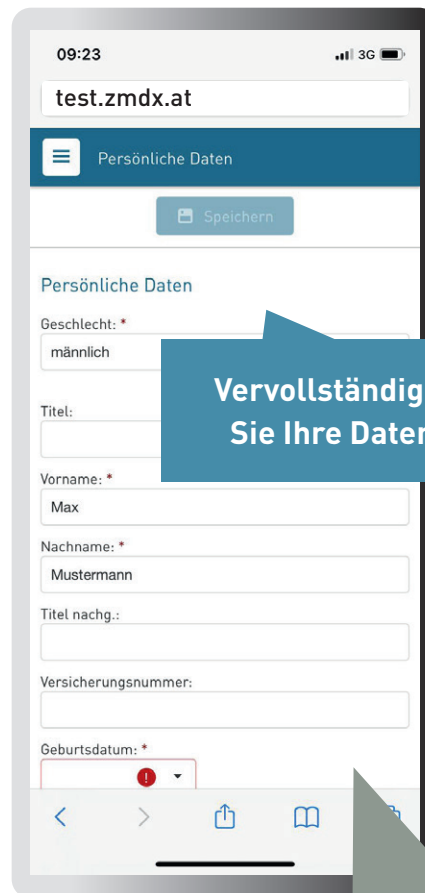
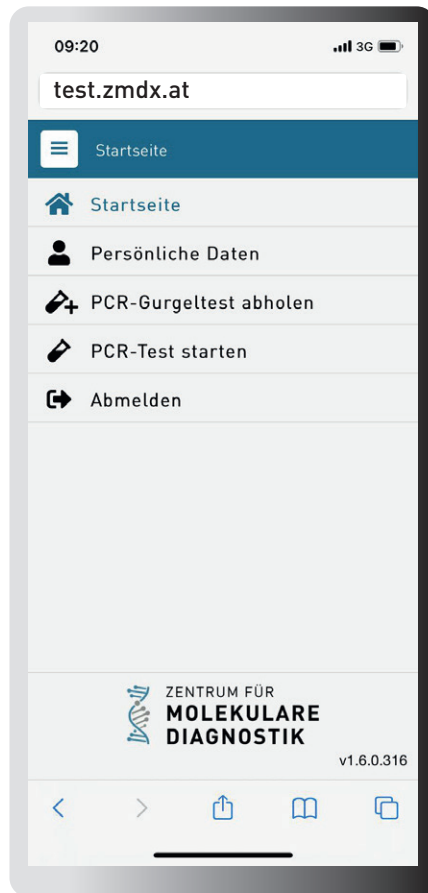


Vervollständigen
Sie Ihre Daten.

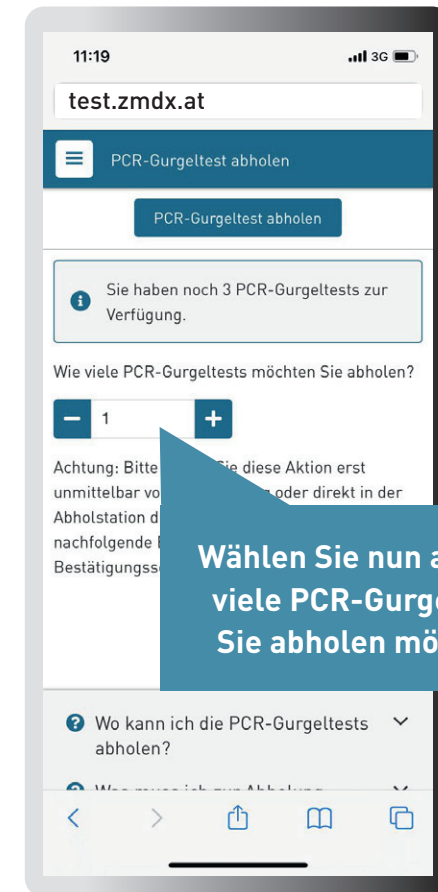


Wählen Sie nun aus, wie
viele PCR-Gurgeltests
Sie abholen möchten.

Wenn Sie weitere Personen hinzufügen
möchten, können diese unter „Neue
Person hinzufügen“ ergänzt werden.

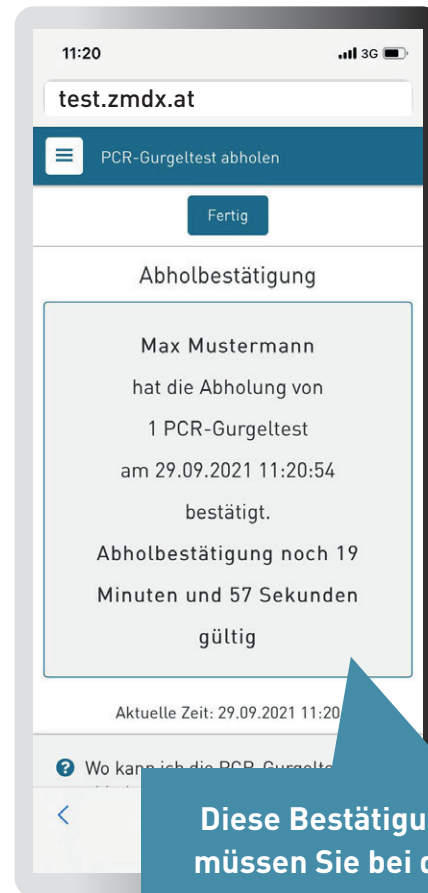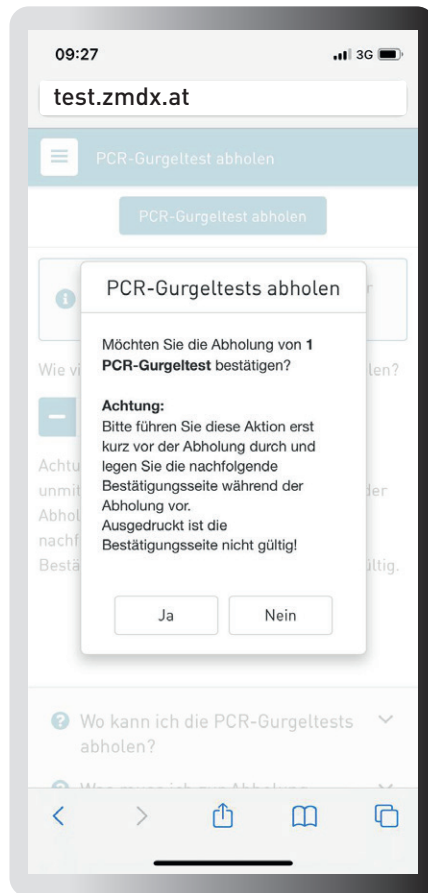

Diese Bestätigung müssen Sie bei der Abholung vorweisen.

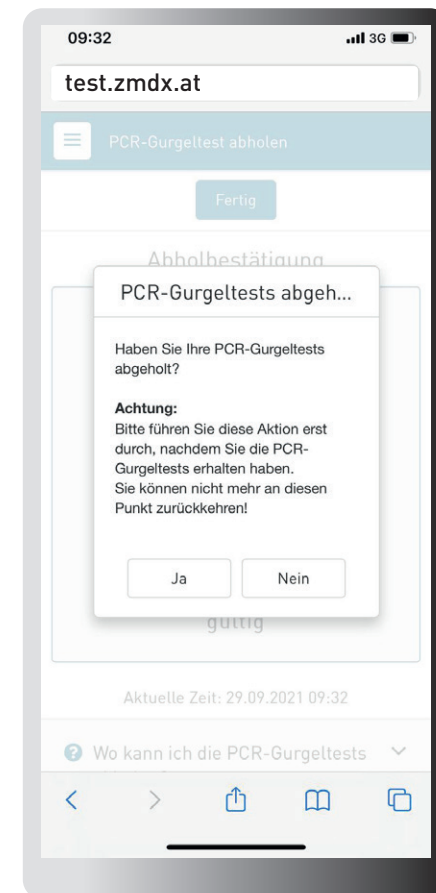


Gehen Sie nun auf
PCR-Test starten.

Aktivieren Sie hier die
Probennummer des
vorliegenden Gurgeltestkits.


Gehen Sie nun auf
PCR-Gurgeltest starten.

Um den Test final
abzuschließen, unbedingt
„FERTIG“ anklicken.


Anleitung Testung

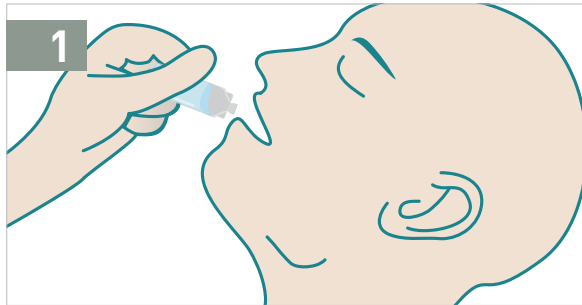


1. Öffnen Sie die Kochsalzlösung nehmen Sie diese in den Mund und spülen/gurgeln Sie damit mindestens 1 Minute gründlich.

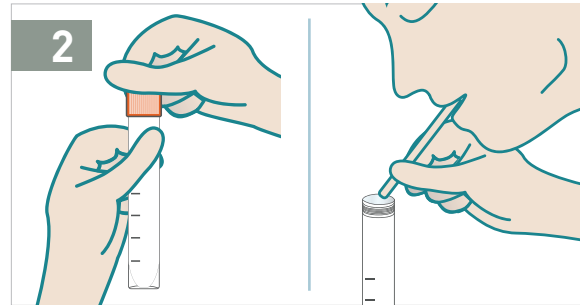

2. Öffnen Sie das Proberöhrchen. Nehmen Sie das Transferröhrchen und spucken Sie damit die gespülte Kochsalzlösung in das Probenröhrchen.

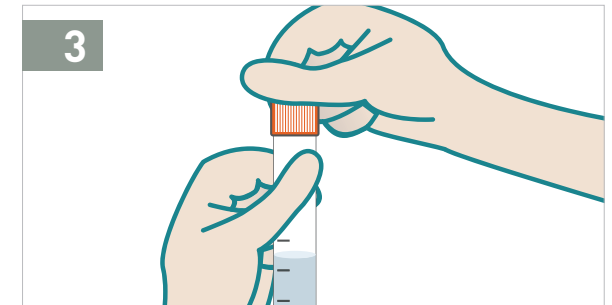

3. Verschließen Sie das Probenröhrchen samt Probe mit der Kappe.

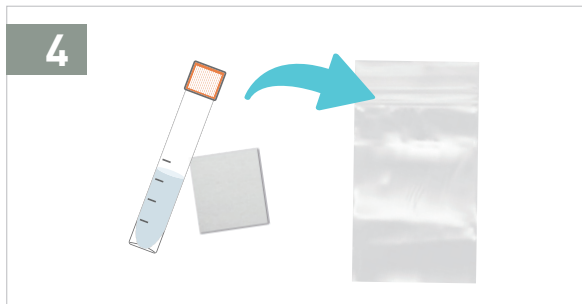

4. Geben Sie das Probenröhrchen mit dem Zellstoff in den Schutzbeutel. Verschließen Sie nun den Schutzbeutel gut.



5. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung mit Ihrer Probennummer sicher auf und geben Sie diese keinesfalls mit in den Schutzbeutel.



6. Bringen Sie den Schutzbeutel samt Probe umgehend nach Probenentnahme zu einer möglichen Abgabestelle. Siehe WebApp.